



LEA EL MANUAL ANTES DE UTILIZAR ESTE PRODUCTO

ES

**COMPEX** ®

**AYRE**

Botas de compresión

Versión: A0 (2019-6-6)



## **CONTENIDO**

Introducción	36
Contraindicaciones	36
Advertencias	36
Precauciones	37
Interpretación de los símbolos	37
Especificaciones del producto	42
Información técnica	42
Configuración	43
Instrucciones de funcionamiento	43
Limpieza y mantenimiento	44
Garantía	45
Información de contacto	46

## INTRODUCCIÓN

Gracias por elegir Compex®. Compex Ayre™ es un masajeador eléctrico con alimentación por batería indicado para el alivio temporal de dolores y molestias musculares leves, y para el aumento temporal de la circulación en las áreas tratadas. Esto se logra mediante una bomba controlada electrónicamente que transporta una cantidad determinada de aire a las bolsas de aire situadas en las piernas que, a su vez, comprimen las pantorrillas o muslos con el fin de aumentar el flujo sanguíneo de las extremidades inferiores.

- Para usar el producto correctamente, asegúrese de leer las instrucciones antes.
- Con el fin de realizar un uso seguro y correcto del producto, lea y entienda completamente las advertencias de seguridad de este manual.
- Le recomendamos guardar este manual en el estuche con el producto, de modo que siempre esté a mano y no se pierda fácilmente.
- Este producto no se considera un dispositivo médico y no está destinado a tratar dolencias médicas ni en entornos sanitarios.

## CONTRAINDICACIONES

### ESTE DISPOSITIVO NO DEBE USARSE PARA TRATAR LAS SIGUIENTES DOLENCIAS:

Pacientes con alguna de las siguientes enfermedades, activas, sin tratar o con sospechas de padecerlas: trombosis venosa profunda, vasculopatía isquémica, arteriosclerosis grave, edema pulmonar, insuficiencia cardíaca congestiva grave, tromboflebitis o una infección activa;

- Pacientes con afecciones en las piernas en las cuales podrían interferir las botas: ligadura venosa, gangrena, dermatitis, heridas abiertas, injerto de piel reciente, edema masivo o deformidad extrema de la pierna.
- No lo utilice en caso de neuropatías ni en personas cuyas extremidades sean insensibles al dolor.
- No lo utilice en situaciones en las que no se recomiende un aumento del retorno linfático o venoso.



## ADVERTENCIA

- No intente reparar el dispositivo.
- No intente abrir ni quitar las fundas.
- No saque la unidad de bomba de la bota.
- No intente modificar ni cambiar el dispositivo.
- Nunca intente realizar tareas de mantenimiento mientras el dispositivo esté en funcionamiento.
- No utilice el dispositivo en un ambiente húmedo.
- No sumerja el dispositivo en ningún líquido por ninguna razón.
- No coloque el dispositivo en una lavadora ni en un autoclave bajo ningún concepto.
- No es adecuado para su uso en presencia de mezclas anestésicas inflamables con aire, oxígeno u óxido nítrico.
- En caso de que se exponga el dispositivo a temperaturas inferiores a 10 °C (50 °F), permita que se caliente hasta alcanzar la temperatura ambiente.
- No exponga el dispositivo a impactos extremos, tales como la caída de la bomba.
- Los equipos portátiles y móviles de comunicaciones por RF pueden verse afectados por este dispositivo.
- Las botas están destinadas al uso de una sola persona.

## PRECAUCIÓN

- Interrumpa el uso del dispositivo en caso de que se produzca hinchazón, irritación cutánea o cualquier otra sensación desagradable o dolorosa, y consulte a un médico.
- Afloje las botas inmediatamente si se producen pulsaciones o latidos, pues es posible que estén demasiado ajustados.
- Quienes padezcan diabetes o enfermedades vasculares deben someterse a valoraciones frecuentes de la piel; consulte a un médico.
- Quienes utilicen dispositivos de calentamiento en combinación con las botas deben someterse a valoraciones frecuentes, puesto que puede producirse irritación cutánea; consulte a un médico.
- Quienes se sitúen con las piernas elevadas (con o sin las botas) durante un periodo de tiempo prolongado requieren una atención especial para evitar el síndrome compartimental de las extremidades; consulte a un médico.

## CONDICIONES AMBIENTALES PARA EL FUNCIONAMIENTO, TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO NORMALES

- Temperatura ambiente normal de trabajo: 5–40 °C
- Humedad ambiente normal de trabajo: ≤80 % HR
- Almacenar y transportar a temperatura ambiente: -25–70 °C
- Almacenar y transportar a humedad ambiente: ≤93 % HR
- Presión atmosférica normal de funcionamiento: 80 kPa-110 kPa
- Presión atmosférica de almacenamiento y transporte: 70 kPa-110 kPa

## INTERPRETACIÓN DE LOS SÍMBOLOS

La información esencial para un uso adecuado deberá indicarse mediante el uso de los símbolos correspondientes. Los siguientes símbolos se pueden ver en el dispositivo y en el etiquetado.



Consultar las instrucciones de uso



Fabricante

**IP22**

Código IP del dispositivo



Pieza aplicada tipo BF



No reciclable



PRECAUCIÓN, evite lesiones. Lee atentamente el manual de usuario antes de utilizar este producto.



Este lado hacia arriba



Símbolo de "REPRESENTANTE AUTORIZADO EN LA UNIÓN EUROPEA"



Fecha de fabricación



Frágil, manipular con cuidado

**LOT**

Código de lote



Mantener el producto en un lugar seco y alejado de agua y lluvia.

**SN**

Número de serie



El embalaje del producto puede reciclarse

## COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA Y DECLARACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS FCC

1. Este producto necesita precauciones especiales con respecto a la compatibilidad electromagnética (CEM) y debe instalarse y ponerse en funcionamiento de acuerdo con la información proporcionada por CEM. Esta unidad puede verse afectada por el equipo de comunicaciones portátil y móvil de radiofrecuencia (RF).
2. No utilice un teléfono móvil ni otros dispositivos que emitan campos electromagnéticos cerca de la unidad. Esto puede provocar un funcionamiento incorrecto de la unidad.
3. Cuidado: Esta unidad ha sido probada y examinada completamente para asegurar el funcionamiento y el rendimiento adecuados.
4. Cuidado: Esta máquina no se debe utilizar cerca de otro equipo ni se debe colocar sobre él y, si esto fuera inevitable, es preciso comprobar si la máquina funciona con normalidad en la configuración en la que se usará.

<b>DIRECTRICES Y DECLARACIÓN DEL FABRICANTE SOBRE EMISIONES ELECTROMAGNÉTICAS</b>		
El dispositivo está diseñado para utilizarse en el entorno electromagnético que se describe a continuación. El cliente o el usuario del dispositivo deben asegurarse de que se utilice en dicho entorno.		
<b>PRUEBA DE EMISIONES</b>	<b>CUMPLIMIENTO</b>	<b>ENTORNO ELECTROMAGNÉTICO: DIRECTRICES</b>
Emisiones de RF CISPR 11	Grupo 1	El dispositivo utiliza energía de RF solo para su funcionamiento interno. Por lo tanto, sus emisiones de radiofrecuencia son muy bajas y no es probable que provoquen interferencia alguna en los equipos electrónicos cercanos.
Emisiones de RF CISPR 11	Clase B	El dispositivo es adecuado para usar en todos los establecimientos, incluidos los entornos domésticos y aquellos conectados directamente a la red pública de suministro eléctrico de bajo voltaje que abastece a los edificios utilizados con fines domésticos.
Emisiones armónicas CEI 61000-3-2	Clase A	
Fluctuaciones de tensión/ emisiones de parpadeo CEI 61000-3-3	Cumple	

## GUÍA Y DECLARACIÓN DEL FABRICANTE SOBRE INMUNIDAD ELECTROMAGNÉTICA


El dispositivo está diseñado para utilizarse en el entorno electromagnético que se describe a continuación. El cliente o usuario del dispositivo debe asegurarse de que se utilice en dicho entorno.

PRUEBA DE INMUNIDAD	NIVEL DE PRUEBA CEI 60601	NIVEL DE CUMPLIMIENTO	ELECTROMAGNÉTICO
Descarga electrostática (DEE) CEI 61000-4-2	±8 kV por contacto ±15 kV por aire	±8 kV por contacto ±15 kV por aire	El suelo debe ser de madera, hormigón o baldosas de cerámica. Si el suelo está revestido de material sintético, la humedad relativa debe ser por lo menos del 30 %
Transitorios eléctricos rápidos/ráfagas CEI 61000-4-4	±2 kV para líneas de fuentes de alimentación ±1 kV para líneas de entrada/salida	±2 kV para líneas de fuentes de alimentación	La calidad de la corriente suministrada por la red eléctrica debe ser la de un entorno comercial u hospitalario normal.
Sobretensión CEI 61000-4-5	±1 kV línea(s) a línea(s) ±2 kV línea(s) a tierra	±1 kV en modo diferencial	La calidad de la corriente suministrada por la red eléctrica debe ser la de un entorno comercial u hospitalario normal.
Caídas de tensión, interrupciones breves y variaciones de tensión en las líneas de entrada de la fuente de alimentación CEI 61000-4-11	<5 % UT (>95 % bajada en UT) para 0,5 ciclos 40 % UT (60 % bajada en UT) para 5 ciclos 70 % UT (30 % bajada en UT) para 25 ciclos <5 % UT (>95 % bajada en UT) para 5 segundos	<5 % UT (>95 % bajada en UT) para 0,5 ciclos 40 % UT (60 % bajada en UT) para 5 ciclos 70 % UT (30 % bajada en UT) para 25 ciclos <5 % UT (>95 % bajada en UT) para 5 segundos	La calidad de la corriente suministrada por la red eléctrica debe ser la de un entorno comercial u hospitalario normal. Si el usuario del dispositivo debe seguir utilizándolo aunque se produzca un corte en la red eléctrica, se recomienda alimentar el dispositivo con un suministro eléctrico ininterrumpido o una batería
Campo magnético de la frecuencia eléctrica (50 Hz/60 Hz) CEI 61000-4-8	30 A/m	30 A/m	Los campos magnéticos de la frecuencia de potencia deben encontrarse en los niveles propios de una instalación típica en un entorno comercial u hospitalario normal.

NOTA: UT es el voltaje del suministro eléctrico de c.a. anterior a la aplicación del nivel de prueba.

## GUÍA Y DECLARACIÓN DEL FABRICANTE SOBRE INMUNIDAD ELECTROMAGNÉTICA

El dispositivo está diseñado para utilizarse en el entorno electromagnético que se describe a continuación. El cliente o usuario del dispositivo debe asegurarse de que se utilice en dicho entorno.

PRUEBA DE INMUNIDAD	NIVEL DE PRUEBA CEI 60601	NIVEL DE CUMPLIMIENTO	ENTORNO ELECTROMAGNÉTICO: DIRECTRICES
RF conducida CEI 61000-4-6	3 Vrms 150 kHz a 80 MHz	3 Vrms	La distancia entre los equipos portátiles y móviles de comunicación de RF y cualquiera de las piezas de este dispositivo, incluidos los cables, no debe ser inferior a la distancia de separación recomendada que se calcula a partir de la ecuación correspondiente a la frecuencia del transmisor. <b>Distancia de separación recomendada</b> $d = 1,2\sqrt{P}$ $d = 1,2\sqrt{P}$ 80 MHz a 800 MHz $d = 2,3\sqrt{P}$ 800 MHz a 2,5 GHz
RF radiada CEI 61000-4-3	10 V/m 80 MHz a 2,5 GHz	10 V/m	Donde P es la potencia nominal máxima de salida del transmisor en vatios (W), según el fabricante del transmisor, y d es la distancia de separación recomendada en metros (m). Las intensidades de campo desde los transmisores RF fijos, como se determina mediante una inspección electromagnética in situ, deben ser inferiores al nivel de cumplimiento en cada intervalo de frecuencia. Pueden producirse interferencias en la proximidad de equipos marcados con el siguiente símbolo: 

NOTA 1: A 80 MHz y a 800 MHz, se aplica el intervalo de frecuencias más alto.

NOTA 2: Es posible que estas pautas no se apliquen en todas las situaciones. La absorción y la reflexión provocadas por estructuras, objetos y personas afectan la propagación electromagnética.

- A. Las intensidades de campo a partir de transmisores fijos, tales como estaciones base para radioteléfonos (celulares/inalámbricos) y teléfonos móviles terrestres, radioaficionados, difusión de radio AM y FM, y difusión de televisión, no se pueden predecir teóricamente con exactitud. Para evaluar el entorno electromagnético provocado por transmisores de RF fijos, se debe considerar la posibilidad de realizar un análisis electromagnético en el lugar. Si la intensidad de campo medida en el sitio donde se utiliza el dispositivo excede el nivel de cumplimiento de RF correspondiente indicado anteriormente, se debe observar el dispositivo con el fin de verificar su buen funcionamiento. Si se observa un rendimiento anormal, pueden requerirse medidas adicionales, tales como la reorientación o reubicación del dispositivo.
- B. Por encima del intervalo de frecuencia de 150 kHz a 80 MHz, las intensidades de campo deben ser inferiores a 3 V/m.



## DISTANCIAS DE SEPARACIÓN RECOMENDADAS ENTRE EL DISPOSITIVO Y EL EQUIPO PORTÁTIL Y MÓVIL DE COMUNICACIONES POR RF.

El dispositivo está diseñado para utilizarse en un entorno electromagnético en el que se controlan perturbaciones de RF radiadas. El cliente o el usuario del dispositivo pueden ayudar a prevenir las interferencias electromagnéticas manteniendo una distancia mínima entre equipos de comunicaciones de RF (transmisores) portátiles y móviles, y el dispositivo como se recomienda a continuación, de acuerdo con la potencia de salida máxima del equipo de comunicaciones.

Potencia de salida máxima nominal del transmisor (W)	Distancia de separación según la frecuencia del transmisor (m)		
	150 KHZ A 80 MHZ	80 MHZ A 800 MHZ	800 MHZ A 2,5 GHZ
0,01	<b>0,12</b>	<b>0,12</b>	<b>0,23</b>
0,1	<b>0,38</b>	<b>0,38</b>	<b>0,73</b>
1	<b>1,2</b>	<b>1,2</b>	<b>2,3</b>
10	<b>3,8</b>	<b>3,8</b>	<b>7,3</b>
100	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>23</b>

En el caso de los transmisores cuya potencia nominal máxima de salida no figura en la lista anterior, la distancia "d" de separación recomendada en metros (m) se puede determinar por medio de la ecuación aplicable a la frecuencia del transmisor, donde P es la potencia nominal máxima de salida del transmisor en vatios (W), según lo declarado por su fabricante.

NOTA 1: A 80 MHz y a 800 MHz, se aplica la distancia de separación del intervalo de frecuencias más alto.

NOTA 2: Es posible que estas pautas no se apliquen en todas las situaciones. La absorción y la reflexión provocadas por estructuras, objetos y personas afectan la propagación electromagnética.

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las normas FCC. El funcionamiento está sujeto a las dos siguientes condiciones:

- A. Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales, y
- B. Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencias que puedan provocar un funcionamiento anómalo

El dispositivo en cuestión ha sido probado y se ha demostrado que cumple con los límites para dispositivos digitales de clase B, en virtud de la Parte 15 de las normas FCC. Estos límites están diseñados para ofrecer una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial.

Este producto genera, utiliza y puede radiar energía de radiofrecuencia, y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales a comunicaciones de radio.

Sin embargo, no se puede garantizar la ausencia de interferencia en una instalación específica. Si el producto causa interferencias perjudiciales a la recepción de radio o televisión, que se puede determinar encendiendo y apagando el producto, se invita al usuario a que intente corregir la interferencia con una o más de las siguientes medidas:

- A. Reoriente o reubique la antena receptora.
- B. Aumente la distancia entre el producto y el receptor.
- C. Consulte con el distribuidor o un técnico de radio/TV con experiencia para obtener ayuda.
- D. Conecte el equipo a una toma de corriente en un circuito distinto al que está conectado el receptor.

Los cambios o modificaciones realizados en el producto que no hayan sido expresamente aprobados por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario de manejar el equipo.

## ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

### ACCESORIOS INCLUIDOS EN EL ENVASE

1. Unidad principal \*2 ud.
2. Adaptador \* 1 ud.
3. Manual \*1 ud.

## INFORMACIÓN TÉCNICA

<b>Modelo/tipo</b>	Bota de compresión Compex	<b>Peso</b>	2000g
<b>Fuente de alimentación</b>	Batería de litio de 4500 mAh	<b>Tamaño de la unidad principal</b>	165 x 83 x 57 m
<b>Tamaño de la bota</b>	820 x 290 mm	<b>Grado de protección contra descarga eléctrica</b>	Pieza aplicada tipo BF
<b>Tensión nominal</b>	3,7 V	<b>Tipo de protección contra descarga eléctrica</b>	Equipo con alimentación interna (no corresponde)
<b>Corriente de trabajo</b>	600 mA-2500 mA	<b>Grado de resistencia al agua</b>	IP22
<b>Presión de aire</b>	0-120 mmHg	<b>Garantía</b>	2 años
<b>Modos</b>	2 modos	<b>Versión del software</b>	A0
Nota: No debe esterilizarse.			
No debe usarse en ENTORNOS RICOS EN OXÍGENO			

## CONFIGURACIÓN

Retire el estuche del envase, extraiga el producto y el adaptador, y cargue el dispositivo antes del primer uso. Coloque el pie en la envoltura, cierre la cremallera de la bota y adhiera el velcro a fin de mantener la pierna en la posición correcta. Asegúrese de que la envoltura esté ajustada, pero no demasiado apretada.



## INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

### ENCENDER/APAGAR EL DISPOSITIVO

- Pulse el botón de encendido/apagado durante 1 segundo para encender el dispositivo.
- Este comenzará a funcionar en el modo predefinido/modo F1 con el ajuste de presión predefinida. Para cambiar el modo y los ajustes de presión, consulte a continuación.
- Pulse el botón de encendido/apagado durante 1 segundo para apagar el dispositivo.

### MODE F1

- El dispositivo inflará automáticamente las cuatro cámaras, una a una. Primero inflará la cámara 1 (C1) hasta la presión preestablecida y, después, la cámara 2 (C2), la cámara 3 (C3) y la cámara 4 (C4). La pantalla de la izquierda indica la cámara (C1, C2, C3, C4) y la pantalla de la derecha indica la presión de aire de cada cámara y los cambios desde 00 hasta el valor preestablecido.
- Tras el inflado hasta el valor preestablecido, las cuatro cámaras (C1, C2, C3 y C4) permanecerán infladas durante 10 segundos y, después, se desinflarán hasta cero simultáneamente (la pantalla de la izquierda cambia y muestra el tiempo de uso total y la de la derecha pasa de la presión preestablecido a 00).
- Después de permanecer en presión cero durante 60 segundos (la pantalla de la izquierda muestra el tiempo de uso total y la de la derecha indica 00), se repite el ciclo anterior.

### MODE F2

- Pulse el botón de encendido/apagado para cambiar la función/el modo de F1 a F2.
- F2 infla las cuatro cámaras al mismo tiempo: La pantalla de la izquierda muestra CH (que indica las 4 cámaras) y la de la derecha cambia de 00 al valor preestablecido, con la indicación de la presión de aire en tiempo real.
- Tras el inflado hasta el valor preestablecido, las cuatro cámaras (C1, C2, C3 y C4) permanecerán infladas durante 10 segundos y, después, se desinflarán hasta cero simultáneamente (la pantalla de la izquierda cambia y muestra el tiempo de uso total y la de la derecha pasa del valor preestablecido a 00).
- Después de permanecer en presión cero durante 60 segundos (la pantalla de la izquierda muestra el tiempo de uso total y la de la derecha indica 00), se repite el ciclo anterior.

## CAMBIO DE PRESIÓN

- Es posible ajustar la presión predefinida de 50 mmHg al pulsar el botón SET (Definir): La pantalla de la izquierda muestra C1 (cámara 1) y la de la derecha indica una presión de aire intermitente de 50. Pulse el botón una vez para hacer aumentar la presión en incrementos de 10 desde el ajuste predefinido de 50 mmHg hasta un máximo de 120 mmHg. Si se sigue pulsando el botón una vez alcanzado el valor de 120, la presión se reiniciará a 00 y seguirá aumentando en incrementos de 10. Cuando alcance la presión deseada, pulse el botón SET para seleccionarla. Repita los pasos para ajustar la presión de cada cámara.

### NOTA:

- La luz situada sobre el botón de encendido/apagado estará fija durante el inflado y parpadeará durante el desinflado.
- Con el dispositivo apagado, si se mantiene pulsado el botón de encendido/apagado durante 5 segundos, se restablecerán los ajustes de fábrica, por lo que se borrará el tiempo de uso total y la presión de las cuatro cámaras se volverá a establecer en el valor predefinido de 50 mmHg.
- El dispositivo recordará la presión definida la última vez y el tiempo de uso total. Al encender el dispositivo, el tiempo de uso total se muestra en la pantalla de la izquierda.
- El tiempo máximo acumulado es de 99 horas. Después de 99 horas, se restablecerá en 0. Si el tiempo de uso total es inferior a 1 hora, mostrará el valor 00.
- C1, C2, C3 y C4 indican las cámaras 1, 2, 3 y 4, respectivamente, mientras que CH indica las 4 cámaras juntas.
- El icono de la batería parpadeará durante la carga y estará fijo cuando esté cargada por completo.
- Es posible usar el dispositivo mientras se está cargando.

### RETIRADA Y ALMACENAMIENTO

- Apague el dispositivo antes de retirarlo de la pierna.
- Cuando no lo use, no almacene los componentes en un lugar que esté expuesto a la luz solar directa.
- Cuando no se use, sugerimos cargar el dispositivo cada tres meses.

## LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

NOTA: Inspeccione el dispositivo y siga los procedimientos de limpieza y desinfección antes de cada uso.

ADVERTENCIA: El dispositivo se debe apagar y desconectar de la toma de corriente antes de la limpieza o desinfección, y durante estos procedimientos.

ADVERTENCIA: No sumerja el dispositivo en ningún líquido por ninguna razón. Ni coloque el dispositivo en el autoclave y/o lavadora bajo ningún concepto.

- Limpie la superficie externa de la bomba con un paño suave, humedecido con agua jabonosa o alcohol isopropílico al 70 %. Séquela solamente al aire libre.
- Limpie el exterior de las botas con un paño suave, humedecido con agua jabonosa o alcohol isopropílico al 70 %. Deje secar al aire.
- La unidad debe estar totalmente seca antes de su uso. Para asegurarse de que así sea, deje el dispositivo en posición apagada y desconectado de la toma de corriente durante al menos 30 minutos (y durante tanto tiempo como sea necesario para que la unidad se seque por completo) tras la limpieza o desinfección.
- No saque la unidad de bomba de la bota.
- No coloque las botas en la secadora ni en el microondas.
- No utilice un secador de pelo para acelerar el secado.
- No coloque el dispositivo encima ni delante de radiadores portátiles o fijos para acelerar el secado.
- No use limpiadores abrasivos.

## MANTENIMIENTO POR PARTE DEL USUARIO

- No contiene piezas que el usuario pueda reparar.
- Inspeccione la unidad y todos los componentes para detectar cualquier daño que pudiera haber ocurrido antes de cada uso (por ejemplo, cable del cargador cortado o pelado, carcasa de plástico agrietada, botas rotas, etc.). Consulte este manual para ver una descripción de todos los componentes.
- No intente conectar el cargador si observa algún daño. Evite exponer la unidad a impactos, tales como la caída de la bomba.
- No manipule las botas con objetos punzantes. Si una bolsa de aire está pinchada o si observa una fuga, no intente reparar la unidad ni las botas. Las unidades de repuesto están disponibles a través del Servicio de atención al cliente.
- Evite doblar o plegar las botas por la cámara de aire durante el uso y el transporte de la unidad. No debe reemplazar la batería; las unidades de repuesto están disponibles a través del Servicio al cliente. Póngase en contacto con el distribuidor/fabricante para recibir las instrucciones de reemplazo de los elementos dañados.

## GARANTÍA

Este dispositivo está cubierto por una garantía de dos años desde la fecha de entrega. La garantía se aplica al dispositivo únicamente, por lo que los accesorios y la batería no están cubiertos.

Durante el periodo de garantía, se repararán o reemplazarán los elementos defectuosos sin ningún cargo. Si se observan indicios de mal uso, maltrato, variaciones o daños causados externamente, es posible que la garantía quede anulada.

Para obtener más información, póngase en contacto con el distribuidor/fabricante.

## **INFORMACIÓN DE CONTACTO**

Distribuido por  
DJO France S.A.S  
Centre Européen de Frêt, 3 rue de Bethar  
64990 Mouguerre  
France  
[www.compex.com](http://www.compex.com)

JKH Health Co., LTD.  
Shajing, Baoan District, Shenzhen, China  
Fabricado en China

## PRECAUZIONI

- Interrompere l'utilizzo del dispositivo in caso di gonfiore, irritazione della cute o qualsiasi altra sensazione spiacevole o dolorosa e consultare un medico.
- Allentare immediatamente i manicotti se si avvertono pulsazioni o dolore, i manicotti potrebbero essere stati applicati troppo stretti.
- Le persone con diabete o malattie vascolari richiedono frequenti valutazioni della cute; consultare un medico.
- Le persone che utilizzano dispositivi di riscaldamento in combinazione con i manicotti richiedono frequenti valutazioni, poiché potrebbe verificarsi irritazione della cute; consultare un medico.
- Le persone che sono in posizione litotomica supina (con o senza manicotti) per un periodo di tempo prolungato richiedono un'attenzione particolare per evitare la sindrome compartimentale delle estremità; consultare un medico.

## CONDIZIONI AMBIENTALI PER IL NORMALE FUNZIONAMENTO, TRASPORTO E STOCCAGGIO

- Temperatura ambiente operativa normale: 5~40 °C
- Umidità ambientale operativa normale: ≤ 80% RH
- Temperatura ambiente di conservazione e trasporto: -25~70 °C
- Umidità ambientale di conservazione e trasporto: ≤ 93% RH
- Pressione atmosferica di esercizio normale: 80 kPa - 110 kPa
- Pressione atmosferica di conservazione e trasporto: 70 kPa - 110 kPa

## INTERPRETAZIONE DEI SIMBOLI

Le informazioni essenziali per un uso corretto saranno indicate usando i simboli corrispondenti. I seguenti simboli possono essere visualizzati sul dispositivo e sull'etichettatura.



Consultare le istruzioni per l'uso



Fabbricante

**IP22**

Codice IP del dispositivo



Parte applicata di tipo BF



Non riciclabile



ATTENZIONE, evitare lesioni. Leggere e comprendere il manuale dell'operatore prima di utilizzare questo prodotto.



Alto



Simbolo per "RAPPRESENTANTE AUTORIZZATO PER LA COMUNITÀ EUROPEA"



Data di fabbricazione



Fragile, maneggiare con cautela



Codice lotto



Conservare il prodotto in luogo asciutto, lontano da acqua e pioggia.



Numero di serie



La confezione del prodotto può essere riciclata